

Gebrauchsanweisung

Omni-Sorb® NaCl 5%

Natriumchlorid 5%

Hypertone Kochsalzlösung zur Entquellung von Hornhautödemen und zur Wiederherstellung des osmotischen Hornhautgleichgewichts.

Was ist Omni-Sorb® NaCl 5%?

Omni-Sorb® NaCl 5% ist eine sterile, speziell für die Ophthalmologie entwickelte, Kochsalzlösung, die der „geschwollenen“ Hornhaut überschüssige Flüssigkeit entzieht und dadurch zu einer Verbesserung der Sehfähigkeit führt. Omni-Sorb® NaCl 5% wird aufgrund seiner ausgeprägten entquellenden Eigenschaften, z. B. nach Operationen wie Katarakt-Operationen und Hornhauttransplantationen oder diagnostischen Eingriffen am Auge, wie z. B. Gonioskopie, Funduskopie oder Biomikroskopie angewendet.

Zusammensetzung:

Natriumchlorid 5%, Natriumacetat, Essigsäure, Trometamol, Methylhydroxypropylcellulose, Benzalkoniumchlorid 0,01% (Konservierungsmittel), Wasser für Injektionszwecke.

Omni-Sorb® NaCl 5% kann bei folgenden Indikationen verwendet werden:

- Zur physikalisch-osmotischen Behandlung von Hornhautschwellungen oder Flüssigkeitseinlagerungen jeglicher Genese, wie beispielsweise bei bullöser Keratopathie, als Folge der Fuchs-Hornhautdystrophie, eines endothelialen Hornhauttraumas oder postoperativ, zum Beispiel nach Kataraktentfernung oder bei Keratitis und Konjunktivitis.
- Zur Entquellung der Hornhaut und zur Wiederherstellung des kornealen osmotischen Gleichgewichts.

Wann sollte man Omni-Sorb® NaCl 5% nicht anwenden?

- Bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe.

Für wen ist Omni-Sorb® NaCl 5% geeignet?

Geeignet zur Anwendung bei Jugendlichen und Erwachsenen, die – aufgrund einer osmotischen Dysbalance – an Hornhautödemen jeglicher Genese leiden.

Schwangere, stillende Frauen und Kinder sollten vor der Anwendung von Omni-Sorb® NaCl 5% Ihren behandelnden Arzt konsultieren.

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Omni-Sorb® NaCl 5% auftreten?

Die folgenden Nebenwirkungen wurden bei der Anwendung von Omni-Sorb® NaCl 5% gelegentlich beobachtet:

- Nach Anwendung kann vorübergehend eine Beeinträchtigung der Sehschärfe eintreten. In diesem Fall sollte kein Fahrzeug gelenkt und keine Maschinen bedient werden. Es empfiehlt sich zu warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Unmittelbar nach dem Tropfen können vorübergehende Symptome, wie z.B. leichtes Brennen der Augen auftreten.

Sollten Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, informieren Sie bitte Ihren behandelnden Arzt.

Welche Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind zu beachten?

- Nicht verwenden, wenn die Flasche oder der Sicherheitsverschluss beschädigt sind.
- Das Auge mit der Tropferspitze nicht berühren, um Infektionen oder Verletzungen des Auges zu vermeiden.
- Die Tropferspitze darf nicht mit anderen Gegenständen oder Körperteilen berührt werden.
- Die Verträglichkeit von Omni-Sorb® NaCl 5% mit Kontaktlinsen wurde nicht getestet. Bitte entfernen Sie vor der Anwendung die Kontaktlinsen und setzen Sie diese mit einem zeitlichen Abstand von mindestens 30 Minuten wieder ein.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses wird auf der Omni-Sorb® NaCl 5%-Flasche sowie der Faltschachtel angegeben.
- Eine einzelne Flasche Omni-Sorb® NaCl 5% darf aus Hygienegründen nicht von mehreren Patienten benutzt werden.
- Wenn die Augenbeschwerden während der Anwendung von Omni-Sorb® NaCl 5% andauern oder nach dem Absetzen erneut auftreten, konsultieren Sie bitte umgehend Ihren Augenarzt.
- Omni-Sorb® NaCl 5% ist nicht zur alleinigen Behandlung einer Augeninfektion geeignet. Bitte konsultieren Sie bei Verdacht auf eine Augeninfektion Ihren Augenarzt.

Wie wird Omni-Sorb® NaCl 5% angewendet?

Nur für den äußerlichen Gebrauch.

Schritt 1:

Waschen Sie Ihre Hände jedes Mal gründlich, bevor Sie Omni-Sorb® NaCl 5% anwenden. Vor der ersten Anwendung brechen Sie den Sicherheitsverschluss, indem Sie den Schraubverschluss der Schutzkappe gegen den Uhrzeigersinn öffnen und entfernen Sie vor der Anwendung den Sicherheitsring.

Schritt 2:

Halten Sie die Flasche möglichst senkrecht, mit der Öffnung nach unten, über das Auge. Bitte vermeiden Sie jeglichen Kontakt der Tropferspitze mit den Fingern und dem Auge.

Schritt 3:

Legen Sie nun den Kopf etwas zurück (Nackenposition) und ziehen Sie das Unterlid mit der freien Hand leicht vom Auge ab. Drücken Sie leicht auf die Flasche und tropfen Sie einen Tropfen Omni-Sorb® NaCl 5% in den Bindehautsack des betroffenen Auges ein. Schließen Sie langsam die Augen, so dass sich Omni-Sorb® NaCl 5% gleichmäßig auf der Augenoberfläche verteilen kann.

Nach Benutzung die Flasche mit der Schutzkappe wieder verschließen. Bitte achten Sie darauf die Tropferspitze nicht zu berühren.

Wie oft und wie lange sollte man Omni-Sorb NaCl 5% anwenden?

Omni-Sorb® NaCl 5% kann nach Bedarf 3- bis 5-mal täglich angewendet werden. Die Häufigkeit und Dauer der Anwendung sollte Ihr Augenarzt bestimmen. Omni-Sorb® NaCl 5% sollte nicht länger als 30 Tage fortlaufend angewendet werden. Wenn nach diesem Zeitraum die Symptome weiterhin bestehen sollten, kontaktieren Sie bitte erneut Ihren Augenarzt.

Im Falle einer zusätzlichen lokalen Behandlung der Augen, sprechen Sie bitte mit Ihrem behandelnden Augenarzt. Generell sollte zwischen beiden Anwendungen ein zeitlicher Abstand von ca. 30 Minuten bestehen. Omni-Sorb® NaCl 5% sollte nach den anderen Produkten appliziert werden.

Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:

Augentropfen im 10 ml Behältnis.

Welche Warnhinweise zur Lagerung und Entsorgung sind zu beachten?

Bei 5°C bis 25°C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach dem erstmaligen Öffnen ist Omni-Sorb® NaCl 5% für 30 Tage verwendbar. Bewahren Sie Omni-Sorb® NaCl 5% außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Angaben zur Lotnummer und zum Verfallsdatum finden Sie auf der Flasche sowie der Faltschachtel.

Omni-Sorb® NaCl 5% kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Stand der Gebrauchsinformation: Mai 2023

 OmniVision GmbH
Lindberghstraße 9
82178 Puchheim, Deutschland
Tel.: +49 89 84 07 92-30
Fax: +49 89 84 07 92-40
www.omnivision.de
E-Mail: info@omnivision.de

 0344

Vertrieb Österreich:

OmniVision GmbH
Anton Anderer Platz 6
1210 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 270 70 70
Fax: +43 1 270 70 70-20
www.omnivision.at
E-Mail: info@omnivision.at

	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Sterilisiert mit aseptischen Verfahren
	Gebrauchsanweisung beachten
	Medizinprodukt
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Temperaturbegrenzung

	Vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen
	Fertigungslosnummer, Charge
	Verwendbar bis
	Produktidentifizierungsnummer
	Einfaches Sterilbarrieresystem
	Einfaches Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung