

PYLORI-Screen® Selbsttest



Magen-oder Darmbeschwerden!


90 % der Patienten, die an Magengeschwüren leiden, sind mit HP-Bakterien infiziert.

Das Vorhandensein hochpathogener Stämme von Helicobacter pylori (HP), die die Epitheloberfläche des Magens oder des Darms besiedeln, kann eine chronische Gastritis auslösen, die zu Geschwüren oder Krebs (Magenkrebs o. Lymphdrüsenkrebs) führen kann.


Diagnose

Der Nachweis von zirkulierenden Antikörpern gegen das Bakterium ist der effizienteste Weg zur Diagnose, da Antikörper während des Infektionsprozesses vom Immunsystem produziert werden. Ein positives Ergebnis kann bei Patienten folgen, die zuvor mit dem Bakterium HP infiziert waren. PYLORI-Screen® ist ein hochspezifischer immunologischer Selbsttest für den Nachweis von Anti-HP-Antikörpern durch eine Vollblutprobe.


So funktioniert's:

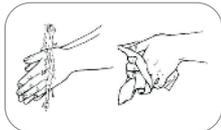


Hände waschen und trocknen!

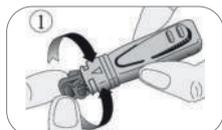


Schutzkappe der Lanzette entriegeln

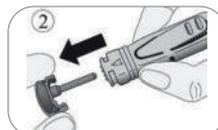


Schutzkappe abziehen.

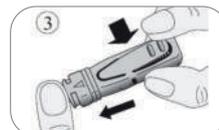


Auslöseknopf der Lanzette drücken.

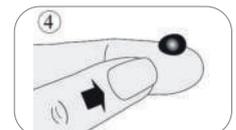

Finger reiben um den Blutfluss zu stimulieren.

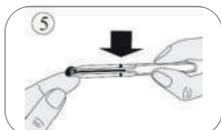

Das Blut wandert durch Kapillarwirkung in die Pipette

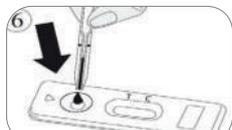

Geben Sie das mit der Pipette aufgefangene Blut in die Probenvertiefung des Testgeräts.




4 Tropfen in die Probenvertiefung



Testergebnis nach 10 Min. ablesen (nach 15 Min. nicht mehr auswerten).

Ergebnisauswertung:

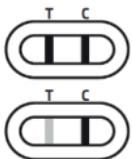


1. Positives Ergebnis

Im Fenster erscheinen zwei farbige Linien mit den Bezeichnungen T (Test) und C (Kontrolle). Die Intensität der Linie T kann deutlicher sein als die Intensität der Linie C. Dieses Ergebnis kann bedeuten, dass die Blutprobe Anti-HP-Antikörper enthält. Sie sollten unbedingt einen Arzt aufsuchen.



2. Negatives Ergebnis:

Unter der Markierung C (Kontrolle) erscheint nur eine farbige Linie. Dieses Ergebnis bedeutet, dass in der Blutprobe keine Anti-HP-Antikörper nachgewiesen werden.

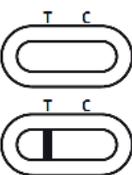

3. Ungültiges Ergebnis


Es erscheint keine Linie oder eine farbige Linie unter der Markierung T (Test) ohne eine Linie unter der Markierung C. In diesem Fall ist es nicht möglich, den Test auszuwerten, was als ungültig betrachtet werden muss. Es wird empfohlen, den Test mit einem neuen PYLORI-Screen® Selbsttest und einer neuen Blutprobe zu wiederholen.

Vorteile

- Zeitersparnis durch schnelle und genaue Ergebnisse
- Einfach durchzuführender Bluttest
- Sicher und schmerzfrei
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Ärzten und Apotheken

Wer sollte einen PYLORI-Screen® Selbsttest machen?

- Ein Selbsttest könnte sinnvoll sein, wenn eine Person anhaltend Magenbeschwerden hat, die auf eine mögliche Helicobacter pylori-Infektion hinweisen könnte, wie z. B. Magenschmerzen, Sodbrennen, Durchfall und Übelkeit.
- Bei Völlegefühl, Schmerzen im Oberbauch, Aufstoßen, Appetitlosigkeit und Mundgeruch.
- Zur Erfolgskontrolle nach der Therapie (frühestens nach 6 Wochen).

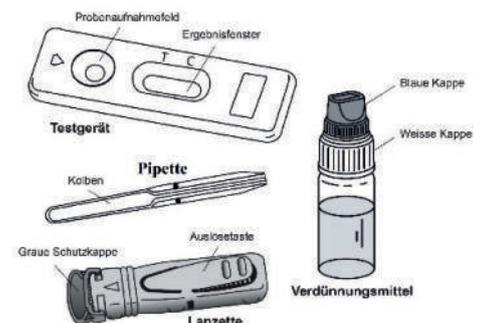

Sicher

Der PYLORI-Screen® Selbsttest ist genau und wird seit mehr als 10 Jahren von Fachleuten in diesem Bereich verwendet. Evaluierungsberichte zeigen eine Gesamtübereinstimmung von mehr als 93,48 % [85,74 - 97,72**] mit Referenzmethoden.