

# Syphilis Selbsttest elac®

## Die Syphilis ist eine sexuell übertragbare Infektion!


Der Syphilis Selbsttest elac® ist ein einfach durchzuführender Bluttest zum Nachweis von Antikörpern gegen *Treponema pallidum* im Vollblut.



In Deutschland gab es in den letzten Jahren einen Anstieg der Syphilis-Fälle. Im Jahr 2020 wurden laut Robert Koch-Institut mehr als 7.000 neue Fälle von Syphilis gemeldet, was einen Anstieg von fast 15% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die einfache und schnelle Durchführung des Syphilis Selbsttest elac® kann dazu beitragen, die Anzahl der unerkannten Fälle von Syphilis zu verringern und die Verbreitung der Krankheit einzudämmen.

Es gibt drei Stadien der Syphilis: das primäre Stadium, das sekundäre Stadium und das späte Stadium. Wenn sie nicht behandelt wird, kann die Syphilis zu schweren gesundheitlichen Komplikationen führen, wie Schädigung des Nervensystems, Blindheit und sogar Tod. Es ist wichtig zu beachten, dass Syphilis in jedem Stadium behandelbar ist.


## So funktioniert's:

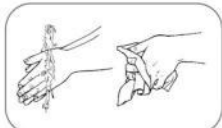


Hände waschen und trocknen!




Schutzkappe der Lanzette entriegeln

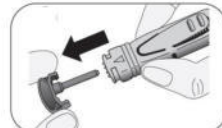


Schutzkappe abziehen.

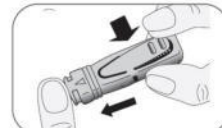

Auslöseknopf der Lanzette drücken.

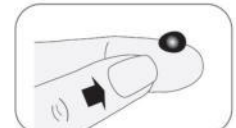


Finger reiben um den Blutfluss zu stimulieren.

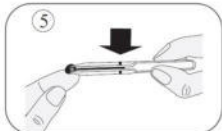

Das Blut wandert durch Kapillarkwirkung in die Pipette



Blut in die Probenvertiefung, indem Sie auf den Pipettenkolben drücken

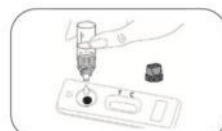


Warten Sie 30-40 Sek. bis das Blut vollständig in die Probenvertiefung eingezogen ist. Dann 4 Tropfen der Lösung in die Probenvertiefung



Testergebnis nach 10 Min. ablesen (nach 15 Min. nicht mehr auswerten).

## Ergebnisauswertung:

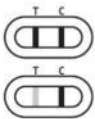


### 1. Positives Ergebnis

Im Fenster erscheinen zwei farbige Linien mit den Bezeichnungen T (Test) und C (Kontrolle). Die Intensität der Linie T kann deutlicher sein als die Intensität der Linie C. Dieses Ergebnis bedeutet, dass die Blutprobe Anti-TP-Antikörper enthält und dass Sie einen Arzt aufsuchen sollten.



### 2. Negatives Ergebnis: Unter der Markierung C (Kontrolle) erscheint nur eine farbige Linie.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass in der Blutprobe keine Anti-TP-Antikörper nachgewiesen werden.

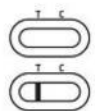

### 3. Ungültiges Ergebnis

Es erscheint keine Linie oder eine farbige Linie unter der Markierung T (Test) ohne eine Linie unter der Markierung C. In diesem Fall ist es nicht möglich, den Test auszuwerten, was als ungültig betrachtet werden muss. Es wird empfohlen, den Test mit einem neuen Syphilis Selbsttest elac® und einer neuen Blutprobe zu wiederholen.

## Vorteile

- Schnelle und genaue Ergebnisse
- Einfach durchzuführender Bluttest
- Entscheidungshilfe ob Arztbesuch notwendig
- Zeitersparnis durch schnelle Ergebnisse, keine Wartezeiten in Arztpraxen

## Wer sollte einen Syphilis-Test machen?

- Bei Verdacht auf eine Syphilis-Infektion nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr oder Kontakt mit einer infizierten Person
- Bei Symptomen wie Geschwüren oder Hautausschlag im Genitalbereich.
- Regelmäßige Überwachung für Personen mit erhöhtem Risiko, z. B. sexuell aktive Menschen, Menschen mit mehreren Sexualpartnern oder Personen, die Drogen injizieren.
- Bei Personen, die vor einer geplanten Schwangerschaft oder vor einer Blutspende sicherstellen möchten, dass sie nicht mit Syphilis infiziert sind.

## Sicher

Der Syphilis Selbsttest elac® ist genau und wird seit mehr als 15 Jahren von Fachleuten in diesem Bereich eingesetzt. Evaluierungsberichte zeigen eine Gesamtübereinstimmung von mehr als 97 % [96,1 - 98,3 %\*\*] mit Referenzmethoden.

