

AUGEN TRÖSTER EDO®

Erfrischende Befeuchtung und Linderung gereizter Augen
Mit Hydrolaten von Kamille, Zaubernuss und Augentrost

Artelac® AUGENTRÖSTER EDO® ist eine sterile Kochsalzlösung für die Augen mit physiologischem pH-Wert.

Die aus Natriumchlorid und Wasser für Injektionszwecke bestehende Kochsalzlösung lindert die Beschwerden bei trockenen und gereizten Augen.

Die Formulierung enthält zusätzlich destilliertes Hydrolat von Kamille, Zaubernuss und Augentrost, um für eine befeuchtende Wirkung zu sorgen.

Sie enthält keine Konservierungsmittel und/oder Moleküle mit entzündungshemmenden und gefäßverengenden Wirkungen.

Artelac® AUGENTRÖSTER EDO® ist geeignet für Kontaktlinsenträger.

VERWENDUNGSZWECK

Artelac® AUGENTRÖSTER EDO® wird für seine erfrischende und lindernde Wirkung angewendet.

Artelac® AUGENTRÖSTER EDO® ist angezeigt zur Linderung der Beschwerden bei trockenen und gereizten Augen verursacht durch:

- Luft- und Umweltfaktoren (Klimaanlage, übermäßige Sonnenstrahlung, Wind, Rauch, Verschmutzung, Salz, Meerwasser, Schwimmbadwasser)
- starke Ermüdung aufgrund langer Bildschirmarbeit oder beim Lernen
- leichtes Syndrom des Trockenen Auges
- vielstündige tägliche Anwendung von Kontaktlinsen.

ANWENDUNG

- Vor der Anwendung gründlich die Hände waschen und abtrocknen.
- Aluminiumschutzbeutel öffnen.
- Einzeldosisbehältnis vom Streifen abtrennen.
- Kappe drehen und entfernen, um die Versiegelung zu öffnen.
- Kappe auf einer sauberen Oberfläche zur Seite legen.
- Durch vorsichtiges Drücken auf das Einzeldosisbehältnis 1 bis 2 Tropfen in jedes Auge geben.
- Einzeldosisbehältnis nach der Anwendung sofort wieder verschließen: Der Inhalt muss innerhalb von 12 Stunden nach Anbruch verwendet werden.
- Das Produkt ist für die häufige Anwendung geeignet. Sofern von Ihrem Arzt nicht anders empfohlen, kann das Produkt auch mehrmals täglich (3- bis 4-Mal oder bei Bedarf häufiger) angewendet werden.

ZUSAMMENSETZUNG

Natriumchlorid (0,85 %), destilliertes Hydrolat von Kamille, destilliertes Hydrolat von Zaubernuss, destilliertes Hydrolat von Augentrost, Natriumdihydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat, Wasser für Injektionszwecke.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Wenn die klare Schicht vorne an Ihrem Auge (die Hornhaut) stark geschädigt ist, können Phosphate in sehr seltenen Fällen trübe Flecken auf der Hornhaut verursachen, da sich während der Behandlung Calcium ansammelt.
- Das Produkt ist nur zur Anwendung an den Augen bestimmt.
- Das Produkt ist zur Anwendung an einem einzelnen Patienten bestimmt.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn das Behältnis bei Anbruch beschädigt oder nicht korrekt verschlossen ist.
- Nicht verwenden, wenn sichtbare Schwebstoffe und/oder farbliche Veränderungen der Lösung vorliegen.
- Während der Anwendung nicht mit dem Tropfer des Behältnisses das Auge oder eine andere Oberfläche berühren.
- Das Produkt nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht verwenden.
- Bei Auftreten von Nebenwirkungen während der Anwendung die Behandlung abbrechen und einen Arzt aufsuchen.
- Das Produkt bei bekannter Unverträglichkeit eines der Bestandteile der Lösung und/oder von Pflanzen aus der Familie der Asteraceae und/oder Compositae und/oder Hamamelidaceae und/oder Orobanchaceae nicht verwenden.
- Es wurden keine Wechselwirkungen mit Arzneimitteln oder anderen Augentropfen berichtet. Dennoch soll bei Anwendung anderer Augentropfen eine Wartezeit von mindestens 15 Minuten zwischen den Anwendungen eingehalten werden.
- Das Produkt entsprechend den örtlichen Abfallbestimmungen entsorgen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

- Wenn Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor Sie dieses Produkt anwenden.
- Nur zur äußerlichen Anwendung, nicht schlucken.
- Schwere Vorkommnisse in Verbindung mit dem Produkt müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats gemeldet werden, in dem Sie wohnhaft sind.

NEBENWIRKUNGEN

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

VERPACKUNG

10 wiederverschließbare Einzel-Dosis-Ophtiolen zu 0,5 ml

AUFBEWAHRUNGSBEDINGUNGEN

Zwischen 2 °C und 25 °C trocken und vor Wärme und direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.

Der Inhalt muss innerhalb von 12 Stunden nach Anbruch verwendet werden.

HALTBARKEIT

Bei einer ungeöffneten Verpackung nicht das Verfalldatum überschreiten, das auf der Schachtel und dem Einzeldosisbehältnis angegeben ist.

®/™ sind eingetragene Warenzeichen von Bausch & Lomb Incorporated oder ihrer verbundenen Unternehmen

© 2024 Bausch & Lomb Incorporated oder ihrer verbundenen Unternehmen

Letzte Überarbeitung: 03.02 von 02/2024

 C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15 – 40019
Sant'Agata Bolognese (BO)
Italien

Anschrift des Vertriebspartners:
Dr. Gerhard Mann
chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165/173
13581 Berlin, Deutschland
Im Auftrag von B&L

DT/01/DT/011

CE 0051

MD

STERILE A

020368



Unser Fokus: Das Wohlbefinden Ihrer Augen



BAUSCH + LOMB

Artelac™ Augentröster EDO®



Natürliche Erfrischung und Linderung für gereizte Augen

Erleben Sie erfrischende Befeuchtung und beruhigende Kraft der Natur bei gereizten Augen. Artelac® Augentröster EDO® Augentropfen enthalten wertvolle Hydrolate aus den Heilpflanzen Augentrost (Euphrasia), Zaubernuss (Hamamelis) und Kamille. Die natürlichen Augentropfen sind speziell auf die Augen abgestimmt: Augentrost hat entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften, die z. B. bei Bindehautentzündungen unterstützend sein können. Zaubernuss lindert Juckreiz und Trockenheit, Kamille fördert die Wundheilung und hilft bei der Regeneration und Beruhigung empfindlicher Augen.

Artelac® Augentröster EDO® Augentropfen eignen sich besonders für Menschen mit empfindlichen Augen und für alle, die eine sanfte Lösung für müde und gereizte Augen suchen. Die sehr gut verträglichen Augentropfen sind für Kinder und Erwachsene geeignet, frei von Konservierungsstoffen und für Kontaktlinsenträger verwendbar. In wiederverschließbaren Einzeldosen ideal für unterwegs.

Spüren Sie die wohltuende Erfrischung mit der Kraft der Natur – Artelac® Augentröster EDO® Augentropfen.

Produkt auf einen Blick

- Erfrischend und lindernd bei müden & gestressten Augen
- Aus den wertvollen Heilpflanzen Augentrost, Zaubernuss und Kamille
- Sehr gut verträglich – für Kinder und Erwachsene geeignet
- Konservierungsmittelfrei

SO FUNKTIONIERT'S

- Vor der Anwendung gründlich die Hände waschen und abtrocknen.
- Aluminiumschutzbeutel öffnen.
- Einzeldosisbehälter vom Streifen abtrennen.
- Kappe drehen und entfernen, um die Versiegelung zu öffnen.
- Kappe auf einer sauberen Oberfläche zur Seite legen.
- Durch vorsichtiges Drücken auf das Einzeldosisbehälter 1 bis 2 Tropfen in jedes Auge geben.
- Einzeldosisbehälter nach der Anwendung sofort wieder verschließen: Der Inhalt muss innerhalb von 12 Stunden nach Anbruch verwendet werden.
- Das Produkt ist für die häufige Anwendung geeignet. Sofern von Ihrem Arzt nicht anders empfohlen, kann das Produkt auch mehrmals täglich (3- bis 4-Mal oder bei Bedarf häufiger) angewendet werden.

FRAGEN & ANTWORTEN

Was sind die wichtigsten Vorteile von Artelac® Augentröster EDO® Augentropfen?

Artelac® Augentröster EDO® Augentropfen bieten eine natürliche, sanfte und wohltuende Linderung für Ihre Augen. Sie werden aus wertvollen Heilpflanzen wie Augentrost, Hamamelis und Kamille hergestellt und bieten entzündungshemmende, antibakterielle und feuchtigkeitsspendende Eigenschaften.

Sind diese Augentropfen auch für Kinder geeignet?

Ja, Artelac® Augentröster EDO® Augentropfen sind sehr gut verträglich und haben keine Altersbeschränkung, so dass sie auch für Kinder geeignet sind.

Können Träger von Kontaktlinsen Artelac® Augentröster EDO® Augentropfen verwenden?

Ja, natürlich. Diese Augentropfen sind konservierungsmittelfrei und daher auch für Kontaktlinsenträger geeignet.

Wie oft kann ich Artelac® Augentröster EDO® Augentropfen anwenden?

Sie können diese Augentropfen je nach Bedarf verwenden, um Ihre Augen mit Feuchtigkeit zu versorgen und sie zu beruhigen.

Träufeln Sie dafür 1-2 Tropfen in den Bindsack des Auges. Die Augentropfen sind für die häufige Anwendung über den Tag hinweg konzipiert.

